

# Aggiornamento VB1 Plus

## Verifica Versione Software

È ora disponibile una nuova versione di aggiornamento del software:

**CS32**

Verificare che la Versione Software attuale, IMPOSTAZIONI → VERSIONE sia la stessa di quella richiesta.

## Aggiornamento Versione Software

1. Scaricare ultimo aggiornamento disponibile dal sito web Isomedic ([www.isomedic.com](http://www.isomedic.com)) nella sezione Aggiornamenti,
2. Copiare il file scaricato dalla cartella Download del vostro PC ad una chiavetta USB vuota,
3. Inserire la chiavetta nella porta USB del vostro strumento,
4. Selezionare: IMPOSTAZIONI → IMPOSTAZIONI AMMINISTRATORE → AGGIORNA SOFTWARE